
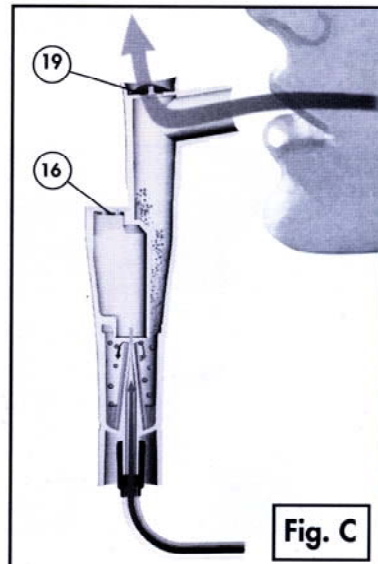


BRUKSANVISNING

FOR

AS1 PRO

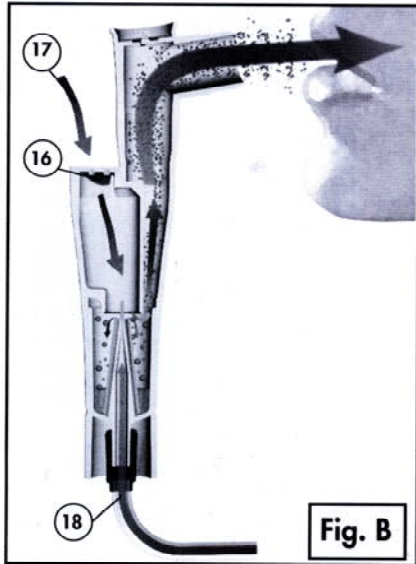

Forhandles av:
Medico a/s
Kirkeveien 71 B
1344 HASLUM
Tlf.: 67 12 98 50
Faks: 67 12 98 51
E-post: post@medico.no
URL: www.medico.no



Kontroller utstyret før hver gangs bruk for å finne mulige uregelmessigheter og/eller skader grunnet transport og/eller lagring. Sitt oppreist og avslappet ved et bord under inhalasjonsbehandlingen. Hvis du sitter i en lenestol vil det gjøre at lungene kommer i klem og behandlingen forringes.

1. Når du har pakket ut apparatet, se etter at det ikke har skader slik at for eksempel elektriske deler inne i apparatet eksponeres.
2. Før apparatet tas i bruk skal det vaskes.
3. Åpne forstøveren ved å skru overdelen mot klokken (fig. D)
4. Se etter at de to dysedelene passer godt i hverandre (fig. E)
5. Fyll det foreskrevne medikament i forstøveren (fig. F)
6. Sett sammen forstøveren ved å skru overdelen og underdel sammen med klokken og påse at de tetter godt.
7. Kople luftslangen til forstøveren (fig. G) og den andre enden av slangen til luftuttaket i kompressoren.
8. For å bruke MEDELJET FORSTØVEREN med ventilsystemet, tilpass utblåsningsventilen (19) og innpustingsventilen (16) til forstøveren og sett på munnstykket (fig. H)
9. Kople strømledningen til kontakten i vegg og skru på apparatet ved å trykke på AV/PÅ bryteren på apparatets forside.
10. Når behandlingen er avsluttet skrues apparatet av ved å trykke på AV/PÅ bryteren på apparatets forside.
11. Forstøveren vaskes med såpevann og skylles under springen i lunket vann. En gang i uken kan du koke den i 10 minutter for ekstra rengjøring. Forstøveren kan også autoklaveres ved 121°C hvis ønskelig.
12. Forstøveren bør skiftes en gang i året i for optimal behandling.

